

Hygieninformation Alcotest*

* Avser Alcotest för professionellt bruk (ex. Alcotest 5820/6000//6820)
Alcotest för privat bruk (modell 3820/4000) ska endast användas utav dig själv och inte för att testa andra

Vi rekommenderar följande:

1. Allmän information:


Följ de rekommenderade hygienrutinerna från myndigheterna;

- Tvätta händerna, ofta, med tvål och vatten i minst 20 sekunder
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att röra vid ögon, näsa och mun

2. Hantering av munstycket och provtagning:

Vad gäller hantering av munstycket så rekommenderar vi följande:

1. Sätt i munstycket med försiktighet
 - Sätt i munstycket genom att dra av plasten på den delen som ska fästas i instrumentet medan du håller i delen som man blåser i.
 - När munstycket är på plats, dra av resterande plast

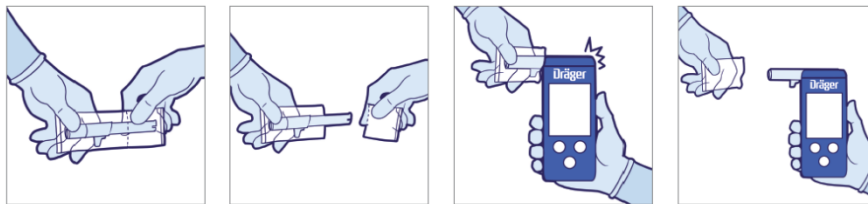


2. Provtagning

- Provtagningen bör, om möjligt, utföras så att testpersonen **inte** blåser i riktning mot den som håller i instrumentet.

3. Ta bort munstycket med en hand

- Munstycket kan enkelt klickas bort genom att trycka med tummen på den lilla piggen. På så sätt undviker man kontakt med ytorna som vidrört munnen/läpparna.

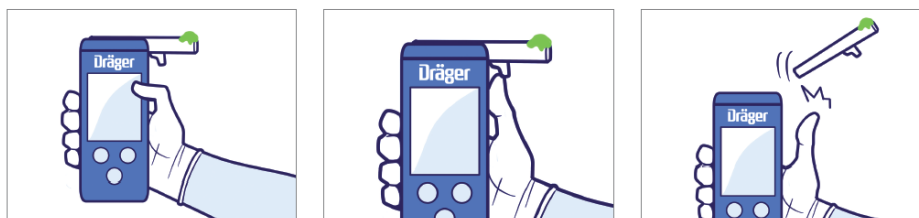

3. Hantering av instrument:

Vad gäller hantering av instrumentet så rekommenderar vi följande:

- Säkerställ god handhygien
- Om du vill rengöra instrumentet, vänligen följ nedanstående rekommendationer

Rengör instrumentet med våtservetter för engångsbruk. Våtservetter som används ska vara fuktiga men får inte vara så våta så att de droppar vätska.

Se till så att vätska inte tränger in i enheten genom luftintaget på instrumentet

Observera: Vi avråder från användning av alkoholbaserade våtservetter

Våtservetterna får **inte** innehålla något utav följande ämnen då dessa kan skada sensorn:

Etanol
Metanol
Isopropanol (2-Propanol)
Aldehyde- baserade
Klorbaserade
Bensalkoniumklorid (med en koncentration högre än > 0.5g per 100g)

Instrumentet ska heller inte förvaras tillsammans med produkter som innehåller något utav ovanstående ämnen

Notera att: om instrumentet rengörs väldigt ofta och under en längre period så kan livslängden för sensorn reduceras. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel sätter stress på sensorn och känsligheten kan påverkas. Vi rekommenderar att kalibrering utförs regelbundet.

För att rengöra, vänligen följ nedanstående steg:

1. Ta bort munstycket
2. Torka av instrumentet
3. Säkerställ att ingen vätska tränger in i enheten
4. Låt instrumentet torka i minst 15 minuter före nästa provtagning

Våtservetter vi kan rekommendera:

– Ecolab Incidin Oxywipe S <https://sv-se.ecolab.com/offerings/pre-impregnated-wipes/incidin-oxywipe-s>

– Pal TECH Multi Surface Antibacterial Wipes <https://www.palinternational.com/en/industrial/wipe-products/multisurface-antibacterial-wipes/>